

harex

NAVODILA ZA UPORABO



Naprava za nadzor
moške incontinece



Polígono Txalaka-Arnedor
Calle Troya 18, Pabellón 6-A5
20115 Astigarraga, Gipuzkoa
España

T: (+34) 943 291 918
info@harex.net

Mera Medical Solutions S.L.

UDOBJE

Obroček za uriniranje HAREX je izdelan iz sanitarno neoporečne ustrezne visokokakovostne plastike, ki je tehnološko preizkušena, da preprečuje vpijanje tekočin. Mere naprave so 48 x 54 x 18 mm, zato je poleg tega, da je varna, tudi majhna in zelo udobna. Ko je naprava nameščena, ne vi ne kdo drug ne bo opazil, da jo nosite. Pripomoček HAREX je popolnoma nastavljen, premakniti morate le ročico za nastavitev, da ga prilagodite potrebnemu pritisku.

OMOGOČA PRETOK KRVI

Naprava ne pritiska na stranice penisa, zato jo lahko nosimo več ur, vendar je priporočljivo, da napravo HAREX odstranite ponoči med spanjem, da se penis umiri. Med ležanjem lahko namesto tega uporabite zaščitno podlogo. Če je trebanapravo uporabiti med ležanjem, trak sprostite, da bo pritisk zblažim pritiskom, kot če bi ga uporabili podnevi.

ŠKATLA ZA SHRANJEVANJE

Komplet vsebuje etuji za nošenje in/ali shranjevanje naprave. Izdelana je iz plastike, zato jo lahko po potrebi higiensko operete.

LAHKO ČIŠČENJE

Napravo lahko enostavno očistite ročno s toplo vodo in milom. V celoti je izdelana iz sanitarno neoporečne plastike. Ker naprava HAREX nima kovinskih elementov, greste lahko brez težav skozi sisteme za odkrivanje kovin, ki se uporabljajo na letališčih, železniških postajah itd.

POMEMBNI NASVETI

Če naravne potrebe po praznjenju mehurja ne zaznavamo, je priporočljivo, da napravo sproščamo vsake 2 ali 3 ure, da se izognemo prekomernemu praznjenju mehurja.

Namestitev uretralne blazine: Ko nameščate napravo, se prepričajte, da je tlačna blaznica, ki pritiska na sečnico v pravilnem položaju in da ni napačno nameščena. Tako bo sečnica ostala popolnoma zaprta in tako se boste izognili uhajanju urina.

Obrežani bolniki: Napravo uporabljajte neposredno za glavo penisa. Če ste nekoliko predebeli ali niste obrezani, pred namestitvijo naprave povlecite nazaj sprednji del kože, kar bo preprečilo premikanje naprave zaradi pritiska na dnu penisa.

Številčenje pasu: na pasu za nastavitev so dodane številke, tako da imate osebno referenco za popoln položaj. Tako lahko napravo vedno namestite v za vas optimalen položaj.

NAMESTITEV NAPRAVE

- 1 Premaknite ročico za nastavitev pasu (B) navzdol, sprostite in zatakните trak.
- 2 Penis vstavite v napravo.
- 3 Prilagodite pas (C) obliki penisa.
- 4 Premaknite ročico (B) navzgor in pritrdite pas (C).
- 5 Premaknite aktivator pritiska (A) navzgor, da blokirate sečnico.

Območje genitalij naj bo čisto, da se izognete draženju.

Če se opazite, da je pripomoček napačno nameščen, bodisi zaradi neprijetnega pritiska bodisi zaradi blage bolečine, je to znak, da je pripomoček pretesen. Trak nekoliko popustite. Preverite, ali na koži penisa ni gub, saj bi to lahko povzročilo nelagodje. S pravim zategovanjem se morate počutiti udobno.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

- 6 Aktivator pritiska premaknite navzdol (A)
- 7 Sprostite nastavitveni vzvod (B) in sprostite pas, tako da je dovolj prostora za odstranitev penisa iz naprave.

URINIRANJE

- 8 Premaknite aktivator pritiska na sečnico (A) navzdol. Naprava bo sprostila pritisk in lahko začnete urinirati.
- 9 Ko končate premaknite aktivator pritiska (A) v začetni položaj.

Pas je zasnovan tako, da se z rahlim pritiskom na sečnico fiziološko pritrdi na penis in tako ustavi iztekanje urina. V primeru nepravilne namestitve lahko povzroči bolečino, zato obvezno upoštevajte opisana navodila. Če ste v dvomih, nam pošljite elektronsko sporočilo in z veseljem bomo pomagali. Imamo odgovore na vsa vaša vprašanja.

POGOJI IN DOLOČILA

Napravo uporabljate na lastno odgovornost in tveganje. Če imate zdravstvene težave, ki niso povezane z inkontinenco, še pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom. Če se pojavijo težave, jo morate nemudoma prenehati uporabljati in o tem obvestiti svojega zdravnika.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

- 6 Aktivator pritiska premaknite navzdol.
- 7 Sprostite ročico, da sprostite pas; penis izvlecite iz naprave.

URINIRANJE

- 8 Aktivator pritiska premaknite navzdol.
- 9 Ko končate, aktivator pritiska vrnite v začetni položaj.

NAMESTITEV NAPRAVE

- Začetna nastavitev.
- 1 Premaknite ročico navzdol, da sprostite pas.
- 2 Vstavite penis v napravo.
- 3 Pas prilagodite obliki penisa.
- 4 Ročico premaknite navzgor, da zapnete pas.
- 5 Aktivator pritiska premaknite navzgor